

Rollator Standard

Gehwagen



Gebrauchsanweisung



Leben in Bewegung

Version 6.0 05.2022

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses!

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung des Rollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Die aktuelle Gebrauchsanweisung zur vergrößerten Darstellung kann bei Ihrem Fachhändler angefordert werden.

Modell	Art. Nr.
Rollator Standard silber	14000051
Rollator Standard silber	14000059
Rollator Standard blau	14000052

Lieferumfang

- Verpackungs- und Transportkarton
- Rollator Standard
- Gebrauchsanweisung

Der Rollator Standard wird montiert in einem Karton geliefert (Art.-Nr. 14000051 zu zweit im Karton). Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung und Transport dient. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Produktbeschreibung



Zweckbestimmung

Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen, z. B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren. Der Rollator kann in Innenräumen und draußen verwendet werden.

Indikation

- Versorgung bei:
- Gehbehinderung
 - Stark eingeschränkter Gehausdauer

Kontraindikation

- Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei:
- Wahrnehmungsstörungen
 - starken Gleichgewichtsstörungen
 - Sitzunfähigkeit



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Alle Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden!
- Die maximale Belastbarkeit (Benutzergewicht und Zuladung) von 130 kg darf nicht überschritten werden!
- Der Rollator ist nur als Gehhilfe einer Person geeignet.
- Der Transport von Lasten oder Personen ist nicht erlaubt!
- Der Rollator darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund benutzt werden!
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn die Fallsicherung korrekt eingerastet ist.
- Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Rollator auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben, um riskante Situationen zu vermeiden
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren (Beachten Sie bitte den Wartungsplan, Seite 6).
- Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als die eigene Schrittgeschwindigkeit. Sturzgefahr!
- Betätigen Sie die Feststellbremsen, bevor Sie den Gehwagen als Sitz nutzen!
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen beim Sitzen oder Beladung (Einkaufskorb) vergrößert werden.
- Nutzen Sie das Tablett nur für kleine und leichte Gegenstände. Es ist nicht geeignet für den Transport von spitzen, scharfen oder heißen Gegenständen!
- Kipprisiko: hängen Sie keine Taschen an die Griffe oder andere Teile des Rollators!
- Klemmgefahr: beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden!
- Die Oberflächen des Rollators können sich bei direkter Sonneneinstrahlung aufheizen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Nicht auf Treppen oder Rolltreppen verwenden!
- Nicht auf das Produkt stellen!
- Der Sitz des Rollators dient nur dem vorübergehenden Ruhen!
- Durch Sand, Meerwasser oder Streusalz können die Lager der Räder beschädigt werden. Reinigen Sie den Rollator gründlich, wenn er solchen Bedingungen ausgesetzt war! (Beachten Sie die Reinigungshinweise auf der Seite 7)
- Bei Einlagerung achten Sie darauf, dass der Rollator trocken, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert wird (Lagerungsbedingungen s. Seite 3). Der Rollator soll dabei gegen ein ungewünschtes Wegrollen gesichert werden.
- Vor jedem Wiedereinsatz und nach längerer Produktlagerung (mehr als 4 Monate) sollen **alle** im Wartungsplan aufgelistete Maßnahmen (Seite 6) durchgeführt werden



Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, indem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktaufkleber

	TRENDMOBIL GmbH Fohling 24 D-33106 Paderborn www.trendmobil.com		2022/04
Typ: Rollator Standard		Max. Belastbarkeit: 130kg 	
Max. Belastung Korb: 7 kg / Max. Belastung Tablett: 5 kg			
SN	TM1459-22-Wxxxx		
EAN	4 260485 210318		



Der Produktaufkleber ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Er darf nicht entfernt werden. Sollte der Produktaufkleber unlesbar werden oder verloren gegangen sein, muss er ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Rollator Standard	
Sitzhöhe (cm)	60
Sitzbreite (cm)	38
Schiebegriffhöhe (cm)	80 – 97
Gesamtbreite (cm)	60
Gewicht ohne Zubehör (kg)	8,9
Max. Zuladung Einkaufskorb (kg)	7
Max. Zuladung Tablett (kg)	5
Max- Belastbarkeit (kg)	130
Max. zulässiger Winkel zwischen Längsmittellinie des Griffs und Bewegungsrichtung (Grad)	0
Material	Rahmen: Stahlrohr, pulverbeschichtet, Sitzfläche: PU, Tablet: PE
Bereifung	PU-Bereifung (pannensicher)
Farbe	grau
Reflektoren	vorne, seitlich und hinten
Lagerungsbedingungen (C°)	0 bis + 45

Individuelle Anpassungen

Handgriffe montieren und Höhenverstellung

Der Rollator wird vormontiert geliefert.

1. Führen Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen ein.
2. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden.
3. Zum Feststellen der Schiebegriffe ziehen Sie die Hebelschraube fest an.
4. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.

Achtung: Beachten Sie die geriffelte Höhenmarkierung an den Rohren der Schiebegriffe und stellen Sie die Höhe niemals über die höchste Position hinaus ein.



Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, hängen Sie diesen mit den vorhandenen Haken an den Rahmen ein.

Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten!

Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kipprisiko erhöht!


Der Korb darf mit max. 7 kg beladen werden.



Tablett montieren

Der Rollator muss entfaltet sein.

1. Legen Sie das Tablett von oben auf das Sitzpolster. Die vier Zapfen auf der Unterseite des Tablett passen zu den Aussparungen auf dem Sitzpolster.
2. Drücken Sie das Tablett fest in die Aussparungen.

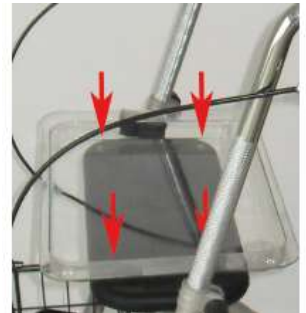

Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremskraft kann individuell eingestellt werden. Stellen Sie dazu die Einstellschraube am Bremsgriff entsprechend ein.

Die Bremsklötze sollten bei Nichtbetätigung der Bremshebel nicht das Laufrad berühren!



Handhabung

Feststellbremsen

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt.

Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus!



Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff. Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben.

Sollten Sie Nachlassen der Bremswirkung oder eine andere Veränderung der Bremsfunktion bemerken, informieren Sie sofort Ihren Fachhändler und lassen die Bremse überprüfen. Weitere Verwendung des Rollators könnte gefährlich sein!



Aufstellen

1. Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie die Bremsen. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator.
2. Drücken Sie die Sitzfläche nach unten und schließen Sie den Sicherungshebel (siehe die nachfolgenden Abbildungen A, B und C).



A. Riegel gesichert



B. Riegel justieren



C. Riegel offen

Zusammenfallen

Um Ihren Rollator platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen.

1. Bitte den Tragekorb und das Tablett vorher entfernen.
2. Lösen Sie zunächst den Sicherungsriegel (siehe Abbildung B und C) am Rahmen, um den Falzvorgang zu ermöglichen.
3. Betätigen Sie die Bremse.
4. Ziehen Sie den Rollator an den Handgriffen zu sich heran. Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen.



Instandhaltung / Wartung



Hinweise für die Fachhändler

Obwohl alle unsere Produkte strenger Qualitätskontrolle unterliegen, weisen wir darauf hin, dass alle Teile und Funktionen des Rollators vor der Abgabe an den Nutzer gründlich geprüft werden müssen. Insbesondere ist auf folgende Punkte zu achten:

- Alle Räder berühren den Boden,
- Alle Räder laufen frei,
- Alle Schrauben sind fest angezogen, besonders die Achsschrauben,
- Feststellbremse und Handbremse funktionieren einwandfrei,
- Klappmechanismus funktioniert einwandfrei.

Eine gründliche Wartung des Produkts sollte mindestens einmal jährlich nach unten aufgeführten Wartungsplan erfolgen und bei der Übergabe an weiteren Nutzer (Wiedereinsatz, S. 7).

Die autorisierte Fachhändler dürfen die Reparaturen nur mit Originalersatzteilen durchführen



Hinweise für die Benutzer

Damit die Nutzung des Rollators jederzeit sicher ist, empfehlen wir regelmäßig deren Zustand und die Funktionen zu überprüfen.

Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden.

Prüfen Sie **vor jeder Verwendung** die Funktionalität der Bremse. Machen Sie dies mit größter Vorsicht und Gewissenhaftigkeit. Sollten Sie eine Veränderung der Eigenschaften bemerken, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Eine nicht 100%-ig funktionierende Bremse birgt große Gefahren für Ihre Gesundheit!

Sollten Sie als Nutzer einen Fehler am Produkt entdecken oder bemerken Sie eine Funktionseinschränkung, wie z.B. Schwergängigkeit der Räder, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Es dürfen keine Reparaturen am Produkt durch den Benutzer vorgenommen werden!

Für nicht autorisierte Veränderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.



Wartungsplan

Maßnahme	Durch Benutzer	Durch Fachhandel
	Vor jeder Verwendung	bei der Übergabe / jährlich
Funktionalität der Räder kontrollieren	x	x
Funktionsfähigkeit der Bremse kontrollieren	x	x
Klappmechanismus funktioniert einwandfrei	x	x
Faltsicherung ist korrekt eingerastet	x	x
Rahmenteile sind unversehrt	x	x
Schrauben zur Fixierung des Sitzes sind fest angezogen	x	x
Alle Schrauben zur Fixierung der Räder sind fest angezogen	x	x

Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen. Der Rollator kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.



Verwenden Sie keine Dampf- oder Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung!



Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden.

Achtung! Keine Drahtbürste verwenden!

Wiedereinsatz

Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden. Der Rollator sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel nach Wartungsplan (S. 6) geprüft und freigegeben werden.

Produktlebensdauer

Wir gehen von einer Produktlebensdauer von **fünf Jahren** aus. Voraussetzung ist, dass das Produkt unter Beachtung der Wartungs- und Sicherheitsvorgaben in der Bedienungsanleitung bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen **24 Monaten** ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind.

Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.

Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich wegen der ordnungsgemäßen Entsorgung und Recycling Ihres TRENDMOBIL-Produktes und seiner Verpackung an Ihren TRENDMOBIL-Händler.

Ihr Fachhändler:



Leben in Bewegung



TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-299

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com