

TSF

TOILETTENSTUHL fahrbar



Gebrauchsanweisung



Leben in Bewegung

Version 2.0 | 01.2020

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses!

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres fahrbaren Toilettensuhls. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Modell	Art. Nr.
Toilettensstuhl fahrbar TSF	11000041

Lieferumfang

- 1 x Verpackung - / Transportkarton
- 1 x Gestell mit montierter Bereifung
- 1 x Rückenlehne mit Armlehnen
- 1 x Sitzbrille mit Abdeckpolster
- 1 x Toiletteneimer mit Deckel
- 1 Paar Fußstützen
- 1 x Gebrauchsanweisung

Der Toilettensstuhl wird in einem Karton geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Toilettensstuhl unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Toilettensstuhl sicher auf dem Boden steht.
- Achten Sie darauf, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden.
- Achtung! Beim Herunterklappen der Sitzfläche können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Kippgefahr! Durch starke einseitige Belastung erhöht sich das Kipprisiko.
- Das Besteigen des Toilettensuhls ist untersagt - Abrutschgefahr!
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.




Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, indem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktbeschreibung



Produktaufkleber

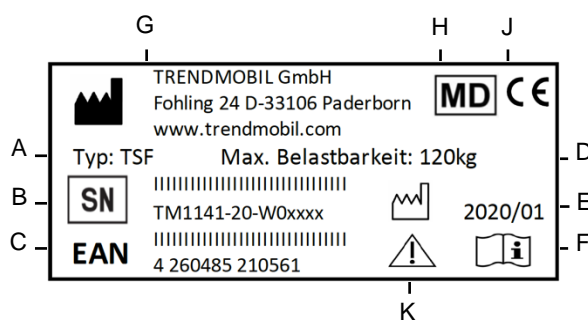

- A – Typ/Modellname
- B – Seriennummer
- C – EAN Identifikation
- D – Max. Belastbarkeit
- E – Herstellungsdatum Jahr/Monat
- F – Bedienungsanleitung beachten
- G – Herstellerangabe
- H – Medizinprodukt
- J – CE-Kennzeichen
- K – Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachten



Der Produktaufkleber ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Er darf nicht entfernt werden. Sollte der Produktaufkleber unlesbar werden oder verloren gegangen sein, muss er ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Zweckbestimmung

Fahrbarer Toilettensstuhl ist dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist. Der TSF kann zusätzlich als Sitzgelegenheit und Zimmerrollstuhl, wenn von einer Begleitperson geschoben, genutzt werden. Benutzungsumgebung sind ausschließlich häusliche und stationäre Innenbereiche.

Indikation

Die Verwendung des Toilettenstuhs ist angezeigt bei:

- Personen mit Gleichgewichtsstörung
- Personen mit erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten
- Deutlich eingeschränkte oder vollständig aufgehobene Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, Hüft- und Kniegelenke

Kontraindikation

Die Verwendung des Toilettenstuhs ist nicht angezeigt bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Technische Daten

Toilettenstuhl fahrbar	TSF
Räder	4 x 5" Rollen mit Feststeller hinten
Material	Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet Kunstleder, ABS
Farbe	Anthrazit
Sitzbreite (cm)	44
Sitztiefe (cm)	41
Sitzhöhe (cm)	50
Armlehnenhöhe (cm)	25
Gesamtbreite (cm)	55
Gesamthöhe (cm)	97
Rückenhöhe (cm)	48
Maße Öffnung (cm)	23x22
Überfahrhöhe-WC (cm)	41
Gewicht (kg)	14,0
Max. Belastbarkeit (kg)	120

Individuelle Anpassungen

Sitzfläche montieren

Betätigen zuerst die Feststellbremsen. Legen Sie die Sitzfläche von oben auf den Rahmen, so wie auf der Abbildung dargestellt. Die Sitzfläche muss so positioniert werden, dass alle Kontaktfläche auf dem Rahmen liegen.

Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche stabil und sicher auf dem Rahmen liegt.

Rückenlehne montieren

Drehen Sie zuerst beide Feststellschrauben am Rahmen heraus. Schieben Sie die Rohre der Rückenlehne in den Rahmen. Ziehen Sie die Feststellschrauben wieder fest an. Bringen Sie die Armlehnen in die waagerechte Position.




Höhenverstellung der Fußstützen

Der TSF ist mit höhenverstellbaren Fußstützen ausgestattet. Zum Einstellen lösen Sie die Verschraubung an der Beinstütze. Der untere Teil der Beinstütze kann jetzt in der Länge eingestellt werden. Nach der Einstellung ziehen Sie die Verschraubung wieder fest an.



Feststellbremsen

Der TSF ist mit vier 5-Zoll Schwenkrollen ausgestattet, wobei zwei Rollen mit Totalfeststeller ausgeführt sind. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen verdrehen gesperrt. Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe. Zum Lösen der Bremse treten Sie auf den kleinen Wippshebel. Der TSF ist nun wieder bewegbar.

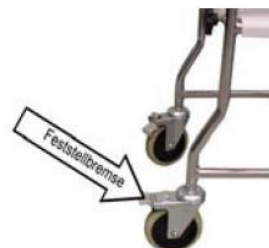

Hochklappen der Fußstützen

Um das Einsteigen zu erleichtern, können die Fußstützen nach außen geschwenkt werden. Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen. Klappen Sie nun die Fußstützen, wie in der Abbildung dargestellt, hoch.



Wegklappen der Armlehnen

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Ziehen Sie den Hebel an den Armlehnen zu sich. Nun können Sie die Armlehne nach unten schwenken. Um diese wieder zu montieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Vergewissern Sie sich, dass der Hebel wieder hörbar eingerastet ist.



Wegschwenken der Fußstützen

Um das Einsteigen zu erleichtern, können die Fußstützen nach außen geschwenkt werden. Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen. Betätigen Sie nun den Hebel wie in der Abbildung dargestellt. Nun kann die Fußstütze um 90° nach außen gedreht werden. Um Sie wieder in die Ausgangsposition zu bringen, einfach um 90° zur Mitte schwenken.



Abnehmen der Fußstützen

Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen. Betätigen Sie nun den Hebel wie beim Wegschwenken der Fußstütze. Nun kann die Fußstütze um 90° nach außen gedreht werden, um Sie danach in Pfeilrichtung aus ihrer Verankerung zu ziehen.



Benutzung

Ein- und Aussteigen von vorne

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Das Fußbrett kann zum leichteren Ein- und Aussteigen hoch geschwenkt werden.

Sobald Sie sicher Platz genommen haben bringen Sie das Fußbrett wieder in die normale Position.



Ein- und Aussteigen von der Seite

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Die Armlehnen können zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach unten geschwenkt werden zuvor beschrieben. Sobald Sie wieder sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Armlehnen wieder in die Ausgangsposition.



Benutzung als Toilettensstuhl

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Zur Benutzung als Toilettensstuhl schieben Sie den Eimer ohne Deckel von hinten entlang der Führung unter den Sitz. Entfernen Sie die Hygieneabdeckung. Entfernen Sie den Eimer nach der Benutzung und verschließen Sie ihn mit dem Deckel.

Nach der Benutzung als Toilettensstuhl

Entfernen Sie den Toiletteneimer erst nachdem die Person nicht mehr auf dem Toilettensstuhl sitzt, sonst besteht Klemmgefahr. Legen Sie den Deckel auf. Reinigen Sie anschließend das Produkt wie im Weiteren beschrieben.



Reinigung / Desinfektion

Der Toilettensstuhl sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Dieser kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung!

Wiedereinsatz

Der Toilettensstuhl ist für den Wiedereinsatz konzipiert.

Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben.

Der Toilettensstuhl muss vor der Weitergabe gereinigt, desinfiziert, gewartet und vom Fachhandel freigegeben werden.

Wartung

Der Toilettensstuhl ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von Ihrem Fachhändler durchführen.

Maßnahme	Täglich	Monatlich	Jährlich	Bemerkung
Radlager ölen			x	Durch Fachhandel
Bremsen kontrollieren	x	x	x	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Polsterung		x	x	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Rahmenteile		x	x	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Verbindungen		x	x	Durch Benutzer und Fachhandel

Produktlebensdauer

Wir gehen von einer Produktlebensdauer von **fünf Jahren** aus. Voraussetzung ist, dass das Produkt unter Beachtung der Wartungs- und Sicherheitsvorgaben in der Bedienungsanleitung bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen **24 Monaten** ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich wegen der ordnungsgemäßen Entsorgung und Recycling Ihres TRENDMOBIL-Produktes und seiner Verpackung an Ihren TRENDMOBIL-Händler.

Ihr Fachhändler:



TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-200

Telefax: +49 (0) 5254-9479-299

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com